

אפליקציית MiniMed™ Mobile

Apple Watch – מאפשר קבלת עדכונים. יש לוודא שאפשרות חייווי מופעלת

במכשיר האיפון, יש להיכנס לאפליקציית Apple watch.

יש ללחוץ על עדכונים.

יש לבדול ברשימת האפליקציות לחיווי של עדכונים:

יש למצוא את אפליקציית MiniMed™ Mobile ולוודא כי היא במצב פעיל.



חשוב לזכור
אם האיפון לא נעול, הרחוקות
לא עוברות לשעון ולכן
העדויות מתקבלות רק בשעון
על אפליקציית האיפון נעול או
במצב שינה.

אפשרויות נגישות

אם תרצה/י לצפות בתצוגה של שעון באופן קבוע ניתן להוסיף "סיבוכים" (complications) שונים לשעון כדי להקל על הצפייה בתוצרים.

1. כשצג השעון מופע, יש ללחוץ ולהחזיק את התצוגה ואז להקיש על עריכה.

2. החלק ימנה עד הסוף והקש/י על מקום הסיבוכי שבו ברצונך להשתמש.

3. יש להשתמש בכתר הדיגיטלי כדי לגלול בין האפשרויות ל-MiniMed™ Mobile. יש שלושה סיבוכים שניתן להשתמש בהם, בחר את זה המתאים לך ביותר*: 1. גדול במיוחד, 2. גדול ממוצע, 3. שירות גדול.



למידע נוסף ניתן לבקר באתר המוקד
של מדסוניק סוכרת.

*לא כל השעונים תומכים בכל הסיבוכים

הוראות חיבור שעון Apple לאפליקציית MiniMed Mobile

התקנת MiniMed™ Mobile בשעון Apple® Watch

השימוש עם Apple® Watch מותאם למשאבות MiniMed™ 780G בלבד.

1. יש לוודא שה-Apple® Watch ו-iPhone שלך מחוברים. ניתן לבדוק זאת בהגדרות ה-Bluetooth® שלך ולהשתמש ב-<https://support.apple.com/en-mn/guide/watch/apd4d6f98e/watchos> אם לא.

2. יש להוריד את אפליקציית MiniMed™ Mobile מ-App Store. באיפון שלך אם עדיין לא עשית זאת.

3. בשלב הבא יש צורך באפליקציית הגלוזית ב-Apple® Watch. אם זה לא קורה אוטומטית, ישנן שתי דרכים לעשות זאת באופן ידני.

א. התקנת האפליקציה באמצעות הסלפון



א. באיפון שלך, יש לפתוח את אפליקציית Watch.
ב. יש להקיש על הכרטיסיה "השעון שלי".
ג. יש להקיש על "התקן ליד האפליקציה MiniMed™ Mobile".

ב. התקנת האפליקציה באמצעות השעון



א. יש ללחוץ על לחצן הכתר הדיגיטלי כדי לראות את מסך הבית ואז להקיש על App Store.
ב. יש להקיש על חיפוש ולהזין "MiniMed Mobile".
ג. מצא/י את האפליקציה המתאימה עם הסמל הזה והקש/י על קבל.

אפליקציית MiniMed™ Mobile (Apple® Watch)

אפליקציית MiniMed™ Mobile עם מערכת משאבות MiniMed™ 780G תואמת גם ל-Apple® Watch. ניתן לצפות בערכים שלך על פני השעון או להקיש כדי להיכנס לאפליקציה.

באפליקציית הסלפון יש גם אפשרויות ייעודיות בתפרים עבור אפליקציית השעון. ניתן לראות את השעון או המשאבה שלך אינם תואמים או אם האפליקציה בשעון חסרה**



הערה: ההודעות שיימוחקו במכשיר הנייד שלך, אינן מתבסלות במשאבה. לא ניתן לבטל הודעות באמצעות השעון

